










SETTORE LABORATORIO - ESAMI	CODICE COLORE	ADDITIVO/ASPIRAZ	CODICE	NOTE
EMATOLOGIA - URGENZE EMATOLOGIA (provetta PEDIATRICA) NT - proBNP (backup Edolo) CONTA LEUCOCITI SU LIQUIDI CAVITARI RICERCA PARASSITA MALARICO ESAMI IN SERVICE	Viola trasparente 	13 x 75 2 ml EDTA k2	368841	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
COAGULAZIONE	Azzurro 	13 x 75 2,7 ml Citrato di Sodio (0,109 M)	363048	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (4 volte) Retrarre la provetta solo ad aspirazione ultimata.
ESAMI COAGULAZIONE IN SERVICE	Azzurro con anello rosa 	13 x 75 2,7 ml Citrato di Sodio (0,109 M)	363048	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (4 volte) Retrarre la provetta solo ad aspirazione ultimata.
CHIMICA CLINICA - URGENZE MARCATORI DI DANNO MIOCARDICO - URGENZE PROCALCITONINA ESAMI IN SERVICE	Verde 	13 x 75 4 ml Eparina di litio (68 IU)	368884	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)
CHIMICA CLINICA - URGENZE (provetta PEDIATRICA)	Verde trasparente 	13 x 75 2 ml Eparina di litio (34 IU)	368494	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (10 volte)

SETTORE LABORATORIO - ESAMI	CODICE COLORE	ADDITIVO/ASPIRAZ	CODICE	NOTE
ESAMI SU SIERO (provetta esclusiva per il NIDO)	Giallo 	Microtainer 9 x 45 0,4 – 0,6 ml Separatore	365968	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione
EMATOLOGIA (provetta esclusiva per il NIDO)	Lilla 	Microtainer 13 x 75 0,25 – 0,5 ml EDTA K2 (1 mg)	363706	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione
INDAGINI VARIE Ammonio (in ghiaccio) Emoglobina Glicata Elettroforesi dell'emoglobina	Blu notte 	13 x 75 2 ml EDTA k2 (3,6 mg)	368843	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione
EMATOLOGIA ROUTINE CHIMICA CLINICA Omocisteina (in ghiaccio)	Viola 	13 x 75 3 ml EDTA k2 (5,4 mg)	364664	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (4 volte)
CHIMICA CLINICA E IMMUNOLOGIA - ROUTINE	Blu Chiaro 	13 x 75 3,5 ml Attivatore e separatore	368966	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (6 volte)


SETTORE LABORATORIO - ESAMI	CODICE COLORE	ADDITIVO/ASPIRAZ	CODICE	NOTE
SIEROLOGIA INFETTIVA	Ruggine 	13 x 75 3,5 ml Attivatore e separatore	368965	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (6 volte)
SIEROLOGIA RPR MNI Test MYCOPLASMA PNEUMONIAE IN URGENZA (solo Edolo)	Oro bassa 	13 x 75 2,5 ml Attivatore e separatore	366882	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (6 volte)
PROTEINE – ELETTROFORESI	Rosa bassa 	13 x 75 3,5 ml Attivatore e separatore	362074	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (6 volte)
AUTOIMMUNITA' – ALLERGOLOGIA	Oro Alta 	13 x 100 5 ml Attivatore e separatore	367955	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (6 volte)
CRIOGLOBULINE	Beige alta 	13 x 100 6 ml Attivatore	368863	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (6 volte)



SETTORE LABORATORIO - ESAMI	CODICE COLORE	ADDITIVO/ASPIRAZ	CODICE	NOTE
BIOLOGIA MOLECOLARE	Perla Anello Rosa 	13 x 100 5 ml Attivatore e separatore	362795	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (6 volte)
ESAMI DA INVIARE IN SERVICE	Rosso alta 	13 x 100 6 ml Attivatore	368815	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (6 volte)
GLICEMIA AMBULATORIALE (per UU.OO solo se ai fini diagnostici) CURVA GLICEMICA PROFILO GLICEMICO GLUCOSIO POST-PRANDIALE	Grigio/anello bianco 	13X75 2mL FC Mix Tampone citrato Sodio Fluoruro (EDTA)	454511 Vacurette	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (12 volte)
TOSSICOLOGICI: RICHIESTA SOLO DA PRONTO SOCCORSO	Grigio 	13X 75 4 ml (10 mg) Potassio Ossalato (8 mg)	368921	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione
COAGULAZIONE PEDIATRICA Dosaggio PIASTRINE in PSEUDOPIASTRINOPENIA da EDTA	Azzurro trasparente 	13 x 75 1,8 ml Citrato di Sodio (0,109 M)	363047	Dopo il prelievo agitare dolcemente per inversione (4 volte) Retrarre la provetta solo ad aspirazione ultimata.

SETTORE LABORATORIO - ESAMI	CODICE COLORE	ADDITIVO/ASPIRAZ	CODICE	NOTE
URINE DEL MATTINO Esame urine	 BLU	Provetta a fondo conico	/	/
URINE RANDOM URINE 24 ORE non trattate URINE 24 ORE raccolte con aggiunta di acido URINE 24 ORE raccolte con aggiunta dibicarbonato di sodio	 BLU	Provetta a fondo cilindrico	/	/
URINE DEL MATTINO	 ROSSO	Provetta a fondo cilindrico	/	/
URINE MATTINO RANDOM Gravidanza – Droghe - Bence Jones CALCOLI URINARI Conta di Addis URINE 24 ORE non trattate Elettroforesi urine – Cortisolo urine	 VERDE	Provetta a fondo cilindrico	/	/
URINE ESAMI IN SERVICE HSR	 GIALLO	Provetta a fondo cilindrico	/	/



SETTORE LABORATORIO - ESAMI	CODICE COLORE	ADDITIVO/ASPIRAZ	CODICE	NOTE
URINE TOSSICOLOGICI: RICHIESTA SOLO DA PRONTO SOCCORSO	 TAPPO A VITE	Provetta tappo a vite	/	/

Aggiornato al 16.04.2026

Il Direttore Dr.ssa G. Bonetti